



KIT EXPERTGUIDE®

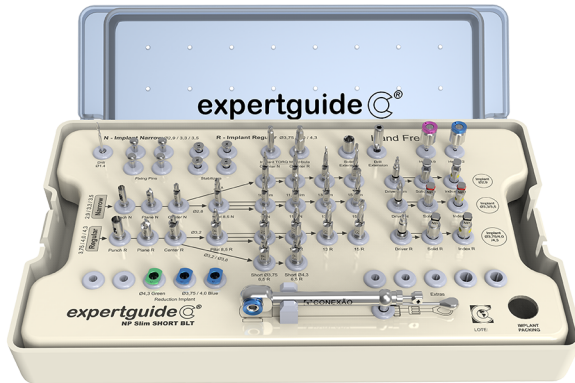


Código do produto explodiido **689926**

Implantes: Narrow Ø2,9 - 3,3 e 3,5 | Regular Ø3,75 - 4,0 e 4,3 Short


Sequência lógica de utilização da esquerda para a direita seguindo as linhas das setas, Narrow e Regular

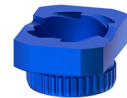

Sleeve Index
Sensitive Regular
900048 - 01 und

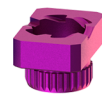

Sleeve Index
Sensitive Narrow
900049 - 01 und

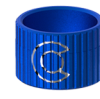

Anilha Regular /
Convencional
900040 - 01 und
900076 - 05 und
900077 - 10 und



Anilha Narrow /
Convencional
900041 - 01 und
900080 - 05 und
900081 - 10 und



Guia
Implantes Narrow
Ø2,9 - 3,3 e 3,5



Guia
Implantes Regular
Ø3,75 - 4,0 e 4,3 Short



Conexão
Digital Implant

COMPOSIÇÃO KIT EXPERTGUIDE®

950055 Caixa Organizadora Expertguide
93610599 Fresa Helicoidal Ø1,4mm - Guide
90006099 Pino Fixador - Guide
99310099 Estabilizador MI NP - Guide
937031 Punch Flat Narrow
934354 Plane Narrow
934353 Center Narrow Ø2,4 - 5mm
934365 Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 8,5mm
934366 Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 10mm
934367 Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 11,5mm
934368 Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 13mm
934382 Fresa Hand Free Narrow SL Ø1,6/2,4 - 10mm
934383 Fresa Hand Free Narrow SL Ø1,6/2,4 - 11,5mm
934384 Fresa Hand Free Narrow SL Ø1,6/2,4 - 13mm
932113 Counter Guide Easy/Torq Ø3,3/3,5

937032 Punch Flat Regular
934356 Plane Regular
934355 Center Regular Ø2,8 - 5mm
934371 Fresa Hand Free Regular Ø2,8/3,2 - 8,5mm
934372 Fresa Hand Free Regular Ø2,8/3,2 - 10mm
934373 Fresa Hand Free Regular Ø2,8/3,2 - 11,5mm
934374 Fresa Hand Free Regular Ø2,8/3,2 - 13mm
934370 Fresa Hand Free Regular Ø2,8/3,2 - 7mm
934377 Fresa Hand Free Regular Ø3,2/3,6 - 7mm
932114 Counter Guide AR/Torq Ø3,75/4,0
977008 Chave Guide NP Narrow
993770 Solid Guide NP Nar
993740 Solid Index Guide NP Nar
977015 Chave Guide SL Narrow
993774 Solid Guide SL Nar

993744 Solid Index Guide SL Nar
977009 Chave Guide NP Regular
993780 Solid Guide NP Reg
993750 Solid Index Guide NP Reg
900055 Anel Redutor Regular
993760 Solid Extension
40300099 Surgical Torque Wrench
99000099 Extensor de Fresas
99102099 Adaptador Quadrado
07020099 Chave Digital Hexagonal 0,9mm Media
07120099 Chave Digital Hexagonal 1,2mm Media
934369 Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 15mm
934385 Fresa Hand Free Narrow SL Ø1,6/2,4 - 15mm
934375 Fresa Hand Free Regular Ø2,8/3,2 - 15mm
900071 Anel Redutor Regular 4,1/4,3
902514 Haste Redutora Narrow

PROTOCOLO HAND FREE



Figura 2 - Chaves de instalação de implantes:

Driver: utilizada para iniciar a instalação dos implantes nas anilhas convencionais ou indexadas.


Solid: utilizada para a finalização dos implantes nas anilhas convencionais.

Index: utilizada para a finalização dos implantes nas anilhas Index.

- Implantes **Narrow** Ø2,9 - 3,3 e 3,5 e implantes **Regular** Ø3,75 - 4,0 e 4,3 Short
- Sequência lógica de utilização da esquerda para a direita seguindo as linhas das setas, Narrow e Regular
- **Importante:** Todas as fresas Hand Free só devem ser acionadas com o motor, quando suas faces paralelas de guias estejam dentro dos 4mm da anilha, seguindo a ilustração abaixo



Conexão
Digital Implant

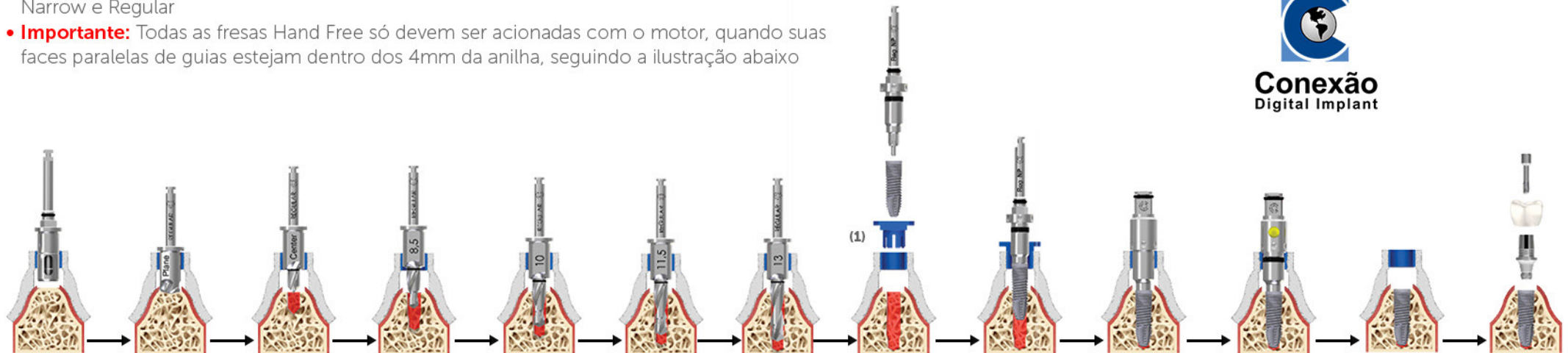

- Sequência de fresagem para colocação de implantes na técnica padronizada de compensação de 9mm entre o topo da guia e o bordo do implante.

Figura 1 - Anel **Reduction**: é utilizado dentro da anilha azul, somente para centralizar o início da instalação dos implantes regulares Ø3,75 e 4,0 no início da chave **Driver**, devendo em seguida ser removido para a finalização dos implantes com as chaves **Sólidas**.