



KIT STARTGUIDE®

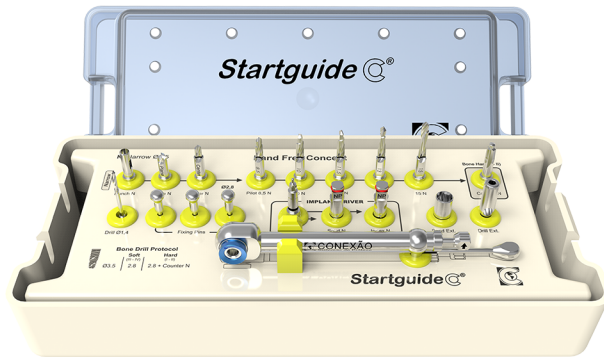


Implantes: Sistemas Morse: NP, FIT, GMF e Hexágono Externo: RD e SD, Short NP/BLT **Diâmetros,** Ø3,5 e Ø3,75

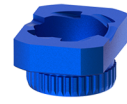

Sleeve Index
Sensitive Regular
900048 - 01 und



Sleeve Index
Sensitive Narrow
900049 - 01 und

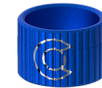

Anilha Regular /
Convencional
900040 - 01 und
900076 - 05 und
900077 - 10 und



Anilha Narrow /
Convencional
900041 - 01 und
900080 - 05 und
900081 - 10 und



Guia
Implantes Narrow
Ø2,9 - 3,3 e 3,5



Guia
Implantes Regular
Ø3,75 - 4,0 e 4,3 Short



Conexão
Digital Implant

COMPOSIÇÃO KIT STARTGUIDE®

950066	Caixa Organizadora Startguide	932118	Counter Guide Flex Nar Ø3,5	993745	Solid Index Guide FIT/GM Nar
937031	Punch Flat Narrow	993760	Solid Extension	977008	Chave Guide NP Narrow
934354	Plane Narrow	99000099	Extensor de Fresas	993770	Solid Guide NP Nar
934353	Center Narrow Ø2,4 - 5mm	90006099	Pino Fixador - Guide	993740	Solid Index Guide NP Nar
934365	Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 8,5mm	93610599	Fresa Helicoidal Ø1,4mm - Guide	977010	Chave Guide HE SD Narrow
934366	Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 10mm	40300099	Surgical Torque Wrench	993743	Solid Index Guide HE SD Nar
934367	Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 11,5mm	99102099	Adaptador Quadrado	993773	Solid Guide HE SD Nar
934368	Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 13mm	977012	Chave Guide FIT / GM Narrow		
934369	Fresa Hand Free Narrow Ø2,4/2,8 - 15mm	993775	Solid Guide FIT/GM Nar		

PROTOCOLO HAND FREE



Figura 2 - Chaves de instalação de implantes:

Driver: utilizada para iniciar a instalação dos implantes nas anilhas convencionais ou indexadas.


Solid: utilizada para a finalização dos implantes nas anilhas convencionais.

Index: utilizada para a finalização dos implantes nas anilhas Index.

- Implantes **Narrow** Ø2,9 - 3,3 e 3,5 e implantes **Regular** Ø3,75 - 4,0 e 4,3 Short
- Sequência lógica de utilização da esquerda para a direita seguindo as linhas das setas, Narrow e Regular
- **Importante:** Todas as fresas Hand Free só devem ser acionadas com o motor, quando suas faces paralelas de guias estejam dentro dos 4mm da anilha, seguindo a ilustração abaixo



Conexão
Digital Implant

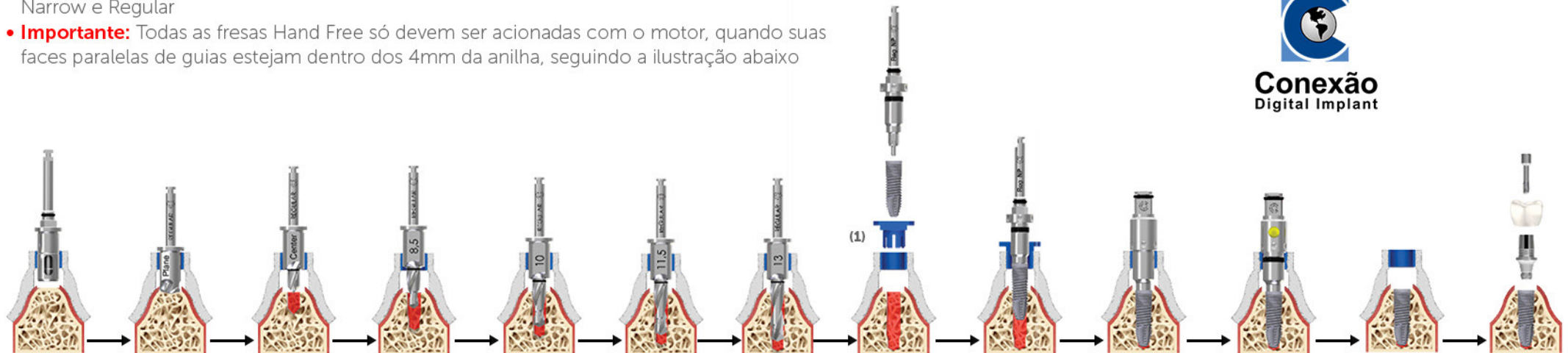

- Sequência de fresagem para colocação de implantes na técnica padronizada de compensação de 9mm entre o topo da guia e o bordo do implante.

Figura 1 - Anel **Reduction**: é utilizado dentro da anilha azul, somente para centralizar o início da instalação dos implantes regulares Ø3,75 e 4,0 no início da chave **Driver**, devendo em seguida ser removido para a finalização dos implantes com as chaves **Sólidas**.